

Vad följer med produkten?



Om du tror att någonting saknas eller om du upplever några problem, ring din lokala distributör.

Toby Churchill Ltd reserves the right to make reasonable changes or modifications to the products, materials and services at any time without notice.

Kom ihåg

- Lightwriter® ska laddas varje natt för att den ska kunna användas optimalt nästa dag
- Lightwriter® försätts i viloläge om den inte används på en stund (Väntetid). Tryck On/C-tangenten för att starta Lightwriter® och fortsätt där du slutade
- Innan Lightwriter® används första gången, ta bort skyddsfilmerna som täcker displayerna

Lär dig mer om Lightwriter® med hjälp av bruksanvisningen.

www.toby-churchill.com

START401SV

TOBY! CHURCHILL

Lightwriter® SL40 Series

Installationsguide



LIGHT!WRITER®

Steg 1: Ladda din Lightwriter®

- Innan du använder din Lightwriter® se till att ladda den
- Det går bra att använda Lightwriter® samtidigt som den laddas
- Det tar ungefär 12 timmar att fulladda batterierna i Lightwriter®



Lyser det en grön lampa på din Lightwriter®? Om inte, se till att laddaren är ordentligt ansluten till både din Lightwriter®, vägguttaget och att strömmen är påslagen.

Steg 2: Slå på din Lightwriter®

- För att slå på din Lightwriter® tryck: **On/C**
- Det kan ta en stund att starta upp Lightwriter®.
När den har startat kommer följande synas i displayen:



- Lightwriter® kommer att ställa några frågor. Följ instruktionerna på displayen (Installationsguiden). Använd **Nästa** och **Tillbaka** tangenterna för att välja bland alternativen, tryck sedan **Ok** för att bekräfta




Tryck Shift och sedan Ok för att lyssna till varje inställning, eller tryck Shift och sedan Hjälp för att få mer information.

Steg 3: Använda Lightwriter®

- Efter att aktuellt datum har ställts in, kommer Huvudmenyn visas i displayen, se bild nedan:



Varje symbol i Huvudmenyn representerar någonting som går att ställa in i din Lightwriter®.

-  Den första fliken är redan upplyst och din Lightwriter® är redo för kommunikation
- Tryck  och börja sedan skriva och prata
-  För att komma tillbaka till Huvudmenyn, tryck på den här tangenten